



Notice d'utilisation des culottes absorbantes ABENA Pants

Application en position debout, sans assistance




1

Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher l'intérieur. Ajuster les bords autour de l'aîne (bords vers l'extérieur).



2

Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

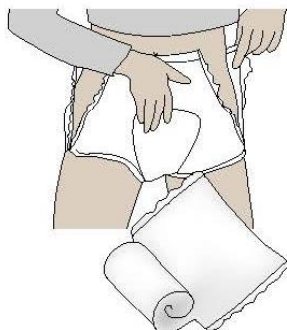

3

Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

Retrouvez les vidéos d'application sur le site internet à l'adresse:
<https://www.abena-frantex.fr/produits/incontinencev1/abri-flex-abena-pants>