




# Notice d'utilisation des protections adhésives homme

## ABENA Man Formula – ABENA Man Slipguard

### ABENA Man Formula: Application en position debout, sans assistance




- 1**  
Déplier la protection. Ne pas toucher l'intérieur.

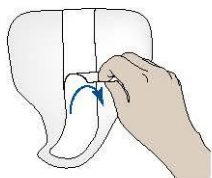

- 2**  
Enlever la bande papier de l'adhésif.



- 3**  
Positionner la protection dans un sous-vêtement ajusté ou un sous-vêtement de maintien.

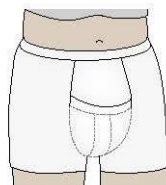

- 4**  
Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

### ABENA Man Slipguard: Application en position debout, sans assistance



- 1**  
Enlever la bande adhésive et déployer légèrement la protection. Ne pas toucher l'intérieur.



- 3**  
Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.



- 2**  
Positionner le pénis à l'intérieur de la protection.  
S'assurer d'utiliser un sous-vêtement ajusté ou un sous-vêtement de maintien.

Retrouvez les vidéos d'application sur le site internet à l'adresse:  
<https://www.abena-frantex.fr/produits/incontinencev1/abri-man-abena-man>