



Notice d'utilisation des changes ceinture ABENA Wing

Application en position assise, avec assistance

1

Déplier le change et sa ceinture. Puis, plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.



2

Placer la ceinture autour des hanches et la fixer à l'aide de l'attache velcro.



3

Rabattre le change depuis l'arrière vers l'avant.



4

Fixer la partie avant du change sur la ceinture à l'aide des attaches. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.




5

S'assurer que les bords de la protection sont correctement ajustés autour de l'aîne (bords tournés vers l'extérieur).

Application en position couchée, avec assistance


1

Déplier le change et sa ceinture. Puis, plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.

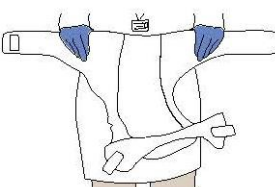


2

Placer l'utilisateur sur le côté. Glisser le change de l'avant vers l'arrière. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré. Si nécessaire, placer une serviette entre les genoux pour faciliter la manipulation.

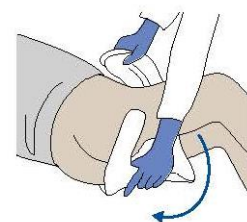


3

Placer l'utilisateur sur le dos. Rabattre le change depuis l'arrière vers l'avant.

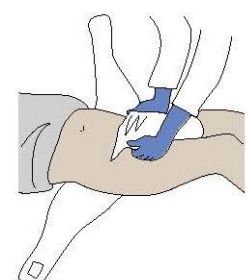


4

Placer la ceinture autour des hanches et la fixer à l'aide de l'attache velcro.

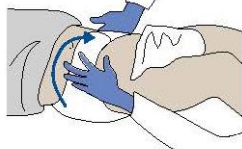


5

Fixer la partie avant du change sur la ceinture à l'aide des attaches.

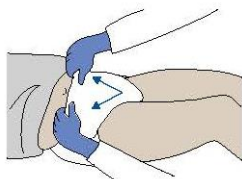

6

S'assurer que les bords de la protection sont correctement ajustés autour de l'aîne (bords tournés vers l'extérieur).

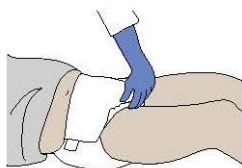

Important: S'assurer que le change est bien ajusté et confortable pour l'utilisateur.

Si le change ne s'ajuste pas correctement au niveau de l'aîne, placer la ceinture légèrement plus haut sur les hanches



Notice d'utilisation des changes ceinture ABENA Wing

Application en position debout, sans assistance



1
Déplier le change et sa ceinture. Puis, plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.



2
Placer la ceinture autour des hanches et la fixer à l'aide de l'attache velcro.



3
Rabattre le change depuis l'arrière vers l'avant. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.



4
Fixer la partie avant du change sur la ceinture à l'aide des attaches.



5
S'assurer que les bords de la protection sont correctement ajustés autour de l'aine (bords tournés vers l'extérieur).

Important: S'assurer que le change est bien ajusté et confortable pour l'utilisateur. Si le change ne s'ajuste pas correctement au niveau de l'aine, placer la ceinture légèrement plus haut sur les hanches.

Application en position debout par fixation arrière, avec assistance



1
Déplier le change et sa ceinture. Puis, plier le change sur la longueur pour former la gouttière, voile externe orienté vers l'extérieur. Ne pas toucher l'intérieur.



2
Placer la ceinture autour des hanches et la fixer à l'aide de l'attache velcro.



3
Rabattre le change depuis l'avant vers l'arrière. Utiliser l'échelle graduée pour s'assurer que le change est correctement centré.



4
Fixer la partie avant du change sur la ceinture à l'aide des attaches.



5
S'assurer que les bords de la protection sont correctement ajustés autour de l'aine (bords tournés vers l'extérieur).

Important: Toujours suivre les directives gouvernementales et institutionnelles concernant l'utilisation et l'application correcte des protections d'incontinence, pour le bien-être des utilisateurs.