

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT



PROTECTIONS ANATOMIQUES POUR FUITES URINAIRES LÉGÈRES









Cette gamme de produits offre un maximum de discrétion et de sécurité par sa forme anatomique.






	Absorption	Couleur	Longueur	Pièces/sac	Sacs/carton	Ref. numéro
Normal			280mm	28	12	5160030280
Extra			350mm	28	10	5160040280
Maxi			405mm	28	6	5160050280

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Absorption rapide	La couche d'acquisition et de distribution favorisent le passage des urines vers le noyau absorbant multi-couches qui contient du SAP (Super Absorbent Polymers). Le SAP est conçu pour absorber et gélifier les urines dans la protection tout en réduisant le reflux.
	Contrôle d'odeurs	Un système anti-odeurs présent dans le noyau absorbant prévient la formation d'ammoniac et d'odeurs désagréables.
	Forme parfaitement adaptée	Les zones élastiques de nos produits assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
	Sensation de coton	Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion.
	Testé dermatologiquement	Les tests dermatologiques ont prouvé que les produits iD ne causent pas d'irritation de la peau.
	Pas de latex	Nos produits sont sans latex.

TECHNIQUES DE MISE EN PLACE

	1. Commencez par déplier délicatement la protection, pliez-la en deux dans le sens de la longueur afin de former une gouttière au centre de la protection. Si la protection est pourvue d'élastiques latéraux, utilisez les afin d'assurer une bonne mise en place. Enlevez la bande papier qui se trouve à l'arrière de la protection.
	2. Ensuite, placez la protection dans le sous-vêtement, positionnez la correctement afin que l'urine arrive dans la partie centrale de la protection.
	3. Enfin, remontez le slip en s'assurant que la protection soit bien placée au niveau des plis inguinaux. Les protections pour incontinence légère doivent toujours être portées avec des sous-vêtements possédant une bonne élasticité.