

FICHE PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

PROTECTION AVEC CEINTURE DE FIXATION INTÉGRÉE










iD Belt est une protection pourvue d'une ceinture intégrée qui offre une solution à une incontinence modérée à sévère et ce pour toute personne active et indépendante. Elle est aussi recommandée pour des personnes ayant une mobilité réduite ou qui nécessitent une assistance. iD Belt est disponible en différentes tailles et différentes absorptions. Le degré d'absorption est déterminé par un système de couleur et de gouttes qui sont mentionnés à la fois sur le produit et sur les emballages. La taille est mentionnée par une lettre, reprise sur les protections et emballages.






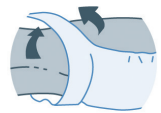

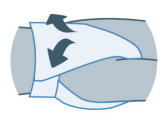
	Absorption	Couleur	Taille		Pièces /sac	Sacs /carton	Ref. numéro
Plus			S	60-95cm	14	4	5700160140
			M	70-115cm	14	4	5700260140
			L	95-135cm	14	4	5700360140
			XL	115-150cm	14	4	5700460140
Super			S	60-95cm	14	4	5700175140
			M	70-115cm	14	4	5700275140
			L	95-135cm	14	4	5700375140
			XL	115-150cm	14	4	5700475140
Maxi			S	60-95cm	14	4	5700180140
			M	70-115cm	14	4	5700280140
			L	95-135cm	14	4	5700380140
			XL	115-150cm	14	4	5700480140
Maxi Plus			M	70-115cm	14	4	5700285140
			L	95-135cm	14	4	5700385140

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Absorption rapide & garde au sec instantanée	La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.
	Contrôle d'odeurs	Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.
	Protection contre les fuites	Les barrières anti-fuites intégrées hydrophobes empêchent les fuites latérales, tout en maintenant sécurité et confort.
	Sensation de coton	Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion.
	Indicateur d'humidité double	L'indicateur d'humidité montre la saturation du produit et indique quand il doit être changé.
	Approuvé par des dermatologues	Toutes nos protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
	100% respirable	Une enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine.

APPLICATION TECHNIQUE



<p>1. Commencer par déplier le produit et l'ouvrir. Ensuite déplier la ceinture de chaque côté. Plier le produit dans le sens de la longueur pour lui donner une forme de « gouttière ». Cette opération permet d'activer les barrières anti-fuites.</p>			<p>1. Commencer par déplier le produit et l'ouvrir. Ensuite déplier la ceinture de chaque côté. Déplier le produit et lui donner une forme de « gouttière » sur toute la longueur. Cette opération permet d'activer les barrières anti-fuites et de donner la forme souhaitée pour la pose du produit.</p>
<p>2. Mettre le patient debout, en s'assurant de sa stabilité. Se mettre face à lui en fixant la ceinture grâce au velcro.</p>			<p>2. Mettre le patient sur le côté, en position de sécurité. Positionnez la protection, glissez la ceinture sous le patient.</p>
<p>3. Passez l'avant de la protection entre les jambes en maintenant la gouttière et fixez la protection sur la ceinture.</p>			<p>3. Passez l'avant de la protection entre les jambes en maintenant la gouttière. Ramenez le patient sur le dos.</p>
<p>4. Tirer délicatement sur la protection, vers le haut, pour l'ajuster, et attacher les velcro sur la ceinture. S'assurer enfin que le produit est correctement ajusté.</p>			<p>4. Fermez la ceinture à hauteur des hanches à l'aide du velcro. Fixez la protection sur la ceinture à l'aide des deux velcros latéraux. Enfin, assurez-vous que la protection soit confortablement positionnée et bien ajustée entre les jambes.</p>