

FICHE PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT



PROTECTIONS POUR PERTES URINAIRES LÉGÈRES À MODÉRÉES



Les iD Light sont des protections emballées individuellement (excepté l'iD Light Ultra Mini) pour les pertes urinaires très légères à moyennes. Ces protections offrent un maximum de discrétion et de confort grâce à leur forme anatomique. Les protections absorbent rapidement l'humidité. Le système anti-odeurs neutralise les odeurs désagréables et vous permet de vous sentir protégée.






	Absorption	Couleur	Longueur	Pièces/sac	Sacs/carton	Ref. numéro
Ultra Mini	●●●●	Pink	190mm	28	12	5111010281
Mini	●●●●	Pink	220mm	20	12	5121020201
Mini Plus	●●●●	Red	250mm	16	18	5171025161
Normal	●●●●	Green	270mm	12	12	5171030121
Extra	●●●●	Blue	340mm	10	12	5171040101
Maxi	●●●●	Purple	370mm	10	12	5171055101
Super	●●●●	Green	405mm	10	12	5171070100

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT iD LIGHT ADVANCED

	Absorption maximale	Le gel innovant et les microfibres : pour une absorption maximale.
	Superflexible	Adaptée à vos mouvements.
	30% plus mince	30% plus mince par rapport à l' iD Light Fresh & Free. Invisible sous vos vêtements.
	Ne laisse aucune chance aux odeurs	Une sensation de fraîcheur jusqu'à 10 heures d'affilée.
	Comme une seconde peau	S'adapte parfaitement aux formes du corps. Comme une seconde peau.
	Doubles barrières anti-fuites	Les doubles barrières anti-fuites empêchent toute fuite.
	Emballage individuel	Emballage individuel (toutes les absorptions sauf iD Light Ultra Mini).

TECHNIQUES DE MISE EN PLACE

	1. Commencez par déplier délicatement la protection, pliez-la en deux dans le sens de la longueur afin de former une gouttière au centre de la protection. Si la protection est pourvue d'élastiques latéraux, utilisez-les afin d'assurer une bonne mise en place. Enlevez la bande papier qui se trouve à l'arrière de la protection.
	2. Ensuite, placez la protection dans le sous-vêtement, positionnez-la correctement afin que l'urine arrive dans la partie centrale de la protection.
	3. Enfin, remontez le slip en s'assurant que la protection soit bien placée au niveau des plis inguinaux. Les protections pour incontinence légère doivent toujours être portées avec des sous-vêtements possédant une bonne élasticité.