

# FICHE PRODUIT



## DESCRIPTION DU PRODUIT

### PROTECTION ANATOMIQUE POUR FUITES URINAIRES LÉGÈRES POUR LES HOMMES










iD For Men est une protection spécialement conçue pour les hommes. iD For Men offre une solution idéale pour l'incontinence urinaire légère. Les zones élastiques assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion. Ces produits sont emballés individuellement.


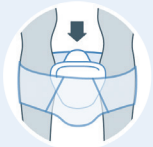



	Absorption	Couleur	Pièces/sac	Sacs/carton	Ref. numéro
Level 1+			10	16	5221035100
Level 2			10	16	5221040100
Level 3			14	12	5231050140

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Protection renforcée	La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.
	Contrôle des odeurs	Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.
	Ajustement parfait	Les zones élastifiées de nos protections assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
	Sensation de coton	Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion.
	Super discret	Sa forme anatomique et sa finesse le rende indétectable.
	Approuvé par des dermatologues	Toutes nos protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
	Pas de latex	Nos produits sont sans latex.

## TECHNIQUES DE MISE EN PLACE

	<b>1.</b> Commencez par descendre le sous-vêtement à hauteur des genoux. Ensuite déployez la protection iD For Men et enlevez le papier de la bande adhésive.
	<b>2.</b> Placez la protection dans le sous-vêtement, positionnez la correctement afin que l'urine arrive dans la partie centrale de la protection.
	<b>3.</b> Enfin, remontez le sous-vêtement et ajustez le pour un confort et une sécurité optimale.