

FICHE PRODUIT



DESCRIPTION DU PRODUIT

PROTECTION POUR INCONTINENCE MODÉRÉE À TRÈS LOURDE










La gamme iD Slip convient aux personnes souffrant d'incontinence modérée à très lourde et est disponible dans une gamme de tailles et d'absorptions différentes. Il est particulièrement recommandé pour les personnes limitées en mobilité ou grabataires. Le degré d'absorption est déterminé par un système de couleur et de gouttes qui sont mentionnés à la fois sur le produit et sur les emballages. La taille est mentionnée par une lettre, reprise sur les protections et emballages.






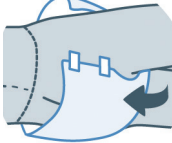
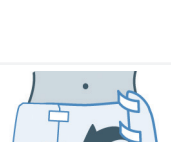



| | Absorption | Couleur | Taille | | Pièces/sac | Sacs/carton | Ref numéro |
|------------|------------|---------|--------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Plus | | | S | 50-90cm | 14 | 4 | 5630160140 |
| | | | M | 80-125cm | 28 | 4 | 5610260280 |
| | | | L | 115-155cm | 28 | 4 | 5610360280 |
| | | | XL | 120-170cm | 14 | 4 | 5630460140 |
| Extra Plus | | | S | 50-90cm | 14 | 4 | 5630170140 |
| | | | M | 80-125cm | 28 | 3 | 5610270280 |
| | | | L | 115-155cm | 28 | 4 | 5610370280 |
| | | | XL | 120-170cm | 14 | 4 | 5630470140 |
| Super | | | XS | 40-70cm | 14 | 12 | 5630075140 |
| | | | S | 50-90cm | 14 | 4 | 5630175140 |
| | | | M | 80-125cm | 28 | 3 | 5630275280 |
| | | | L | 115-155cm | 28 | 3 | 5630375280 |
| | | | XL | 120-170cm | 14 | 4 | 5630475140 |
| | | | XXL | 175-210cm | 15 | 4 | 5630575140 |
| Maxi | | | S | 50-90cm | 20 | 4 | 5630180200 |
| | | | M | 80-125cm | 15 | 3 | 5630280151 |
| | | | L | 115-155cm | 15 | 3 | 5630380151 |
| | | | XL | 120-170cm | 15 | 3 | 5630480150 |
| Maxi Prime | | | M | 80-125cm | 15 | 3 | 56302100150 |
| | | | L | 115-155cm | 15 | 3 | 56303100150 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Absorption rapide & garde au sec instantanée | La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée. |
|  | Contrôle d'odeurs | Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables. |
|  | Protection contre les fuites | Les barrières anti-fuites intégrées hydrophobes empêchent les fuites latérales, tout en maintenant sécurité et confort. |
|  | Sensation de coton | Un touché tissu doux procure un maximum de confort et de discrétion. |
|  | Indicateur d'humidité double | L'indicateur d'humidité montre la saturation du produit et indique quand il doit être changé. |
|  | Approuvé par des dermatologues | Toutes nos protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs. |
|  | 100% respirable | Une enveloppe extérieure 100% respirable aide à maintenir une peau saine. |

TECHNIQUES DE MISE EN PLACE



| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Commencez par plier la protection iD Slip en deux dans le sens de la longueur, laissez vos doigts sur le non tissé et faites les bouger de part et d'autres afin de redresser les barrières anti-fuites.</p> |  |  | <p>1. Commencez par plier la protection iD Slip en deux dans le sens de la longueur, laissez vos doigts sur le non tissé et faites les bouger de part et d'autres afin de redresser les barrières anti-fuites.</p> |
| <p>2. Passez ensuite la protection iD Slip entre les jambes de l'avant vers l'arrière en déployant les extrémités et en s'assurant que l'ex-trémité supérieure soit positionnée sur le coccyx. Assurez-vous que la protection soit centrée correctement en utilisant les indicateurs de miction comme repère.</p> |  |  | <p>2. Tournez la personne délicatement sur le côté, en position de sécurité (légèrement plier la jambe supérieure afin qu'il/elle ne tombe pas hors du lit), mettez la protection à l'arrière de la personne en s'assurant que le haut de la pulpe se situe à la base du pli-interfessier. Centrez la protection en utilisant les indicateurs de miction comme guide. Maintenez votre gouttière formée et passez la protection entre les jambes de la personne.</p> |
| <p>3. Ensuite, fixez les adhésifs du bas afin d'assurer un bon maintien au niveau des jambes. Positionnez ensuite les adhésifs du haut afin d'ajuster la protection au niveau de la taille.</p> |  |  | <p>3. Remettez la personne sur le dos et ramenez le produit entre les jambes en s'assurant que les barrières anti-fuites restent activées, ensuite ajustez l'avant de la protection. Si nécessaire, tournez à nouveau la personne sur le côté afin de vous assurer que l'arrière de la protection et que les adhésifs de fixation soient correctement positionnés.</p> |
| <p>4. Enfin, ajustez pour un confort optimal. Assurez-vous que les velcros soient collés correctement. À la fois le haut et le bas des adhésifs peuvent être fixés soit dans une position angulaire ou linéaire. Ils peuvent également être refermés et réajustés si nécessaire.</p> |  |  | <p>4. Ensuite, fixez les adhésifs du bas afin d'assurer un bon maintien au niveau des jambes. Puis, fixez les adhésifs du haut en position horizontale afin d'assurer un bon maintien autour de la taille. Vérifiez le confort et l'ajustement (les adhésifs peuvent être repositionnés). Assurez-vous que les adhésifs soient collés correctement.</p> |