

# ProCare

## Dent 30 P



### Produit de neutralisation

Concentré liquide, acide, à base d'acide phosphorique. Pour le traitement en machine d'instruments dentaires dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

ProCare Dent 30 P n'est pas adapté à l'instrumentation rotative, aux métaux non ferreux, à l'aluminium anodisé ainsi qu'aux instruments chromés ou nickelés. Les instruments rotatifs peuvent être traités avec le produit Dent 30 C.


### Particularité

ProCare Dent 30 P répond aux exigences de la directive 93/42/CEE, annexe I sur les dispositifs médicaux. **CE**

### Caractéristiques produit

- Permet d'éliminer les couleurs de revenu et les salissures solubles dans l'acide
- Se rince très bien
- Ne contient pas d'agents tensio-actifs

ProCare Dent 30 P est réservé à une utilisation professionnelle.

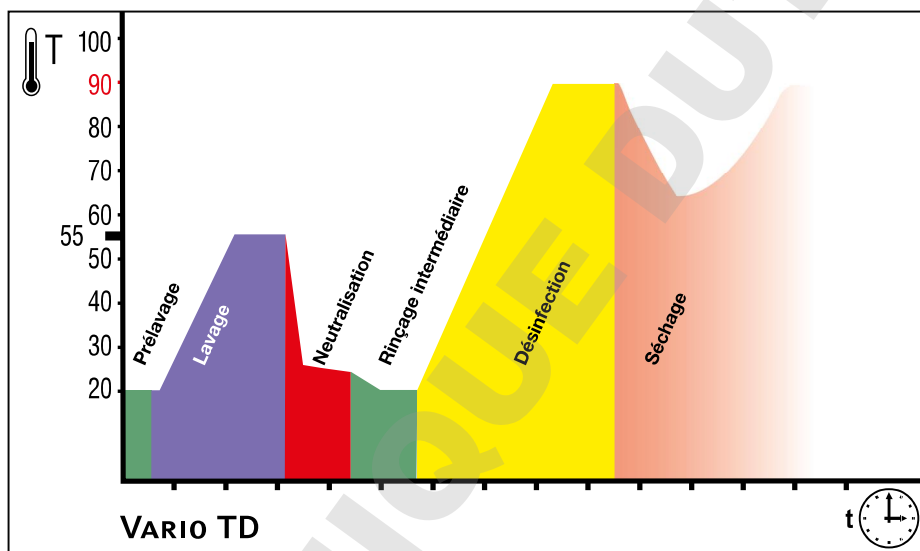

### Application et dosage

Miele ProCare Dent 30 P est adapté au traitement des instruments dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à une pompe doseuse
- Les instruments et les conduites d'évacuation doivent être acidorésistants
- Concentration : 1ml/l
- Choix de programme vario TD

La solution doit être complètement rincée avec de l'eau. Lors d'une utilisation dans un laveur-désinfecteur Miele cela se fait automatiquement par le programme vario TD si toutes les conditions sont réunies (disposition adaptée des instruments dans l'appareil). Une vérification est effectuée par la mesure de l'augmentation de la conductibilité au cours du rinçage final dans le cadre

de la mise en service ou d'une maintenance de routine du laveur-désinfecteur. Nous conseillons l'utilisation d'eau déminéralisée pour la phase de rinçage final afin d'éviter les dépôts et les taches d'eau.

### Déroulement du procédé Vario TD

- Prélavage à l'eau froide pour éliminer les salissures grossières (par ex. sang)
- Lavage
- Neutralisation avec ProCare Dent 30 P
- Rinçage intermédiaire avec de l'eau froide
- Désinfection thermique à 93°C avec temps de maintien pendant 5 min et rinçage final
- Séchage

### Attention !

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Contactez le SAV Miele pour un remplacement de produit.
- Le traitement doit être effectué selon les normes en vigueur et les recommandations des fabricants de dispositifs médicaux avec des procédés adaptés validés.
- Veuillez suivre les indications des fabricants d'instruments conformément à la norme DIN EN ISO 17664.
- Tenez compte des indications des modes d'emploi des laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

# ProCare

## Dent 30 P




### Caractéristiques techniques

- Densité (20°C) : ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur pH (déterminée pour de l'eau déminéralisée, 20°C) 1 ml/l : env. 2,3

### Composants dangereux conformément au décret CE 648/2004

- Acides anorganiques

### Conseils de stockage

- Température de stockage : -15°C à 30°C
- Stockage jusqu'à 4 ans si les consignes de stockage sont respectées
- Utilisable jusqu'au : voir étiquette derrière le symbole 

### Consignes de sécurité

- Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité européennes les informations relatives à la sécurité et à l'environnement.

Vous pouvez les consulter à l'adresse suivante : [www.miele-professional.fr](http://www.miele-professional.fr) / [www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be).

N'éliminez l'emballage que lorsqu'il est vide et fermé. Elimination des restes de produit : voir la fiche des données de sécurité.

Les informations de cette fiche se réfèrent à nos connaissances actuelles. Elles ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer ses propres contrôles et ses propres tests. Ces informations ne doivent pas servir de base légale faisant référence.

### Unité d'emballage et accessoire livrables

Désignation	emballage	numéro de produit
ProCare Dent 30 P	flacon de 1 l (couvercle avec bec verseur)	9 052 070
ProCare Dent 30 P	bidon de 5 l	9 052 080
Clé ouvre-bidon	pour bidons de 5 l et 20 l	9 066 810

### Contact :

Miele Belgique S.A.  
Z.5 Mollem 480  
Hof te Bollebeeklaan, 9  
1730 Mollem (Asse)  
Tél. +32 (0) 2 451.15.40  
[infopro@miele.be](mailto:infopro@miele.be)  
[www.miele-professional.be](http://www.miele-professional.be)

Miele Luxembourg S.à.r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
Luxembourg-Gasperich  
Tél. +352/4 97 11-25  
[infolux@miele.lu](mailto:infolux@miele.lu)

Miele France SAS  
9 avenue Albert Einstein  
BP 1000  
ZI du Coudray  
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex  
Tél. +33 (0) 1 49 39 44 00  
[www.miele-professional.fr](http://www.miele-professional.fr)



Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
[www.drweigert.de](http://www.drweigert.de)