

BLANKETROL® III

Contrôle ciblé de la Température



BLANKETROL® III

Contrôle ciblé de la température




Contrôle précis du refroidissement

et réchauffement des patients

INDICATIONS

- Hypothermie thérapeutique
 - Réanimation post arrêt cardiaque
 - Traumatisme crânien
 - Agression cérébrale
 - Etat de choc
- Réchauffement actif
 - Patients polytraumatisés
 - Patients en hypothermie
- Gestion d'une normothermie périopératoire

MODES

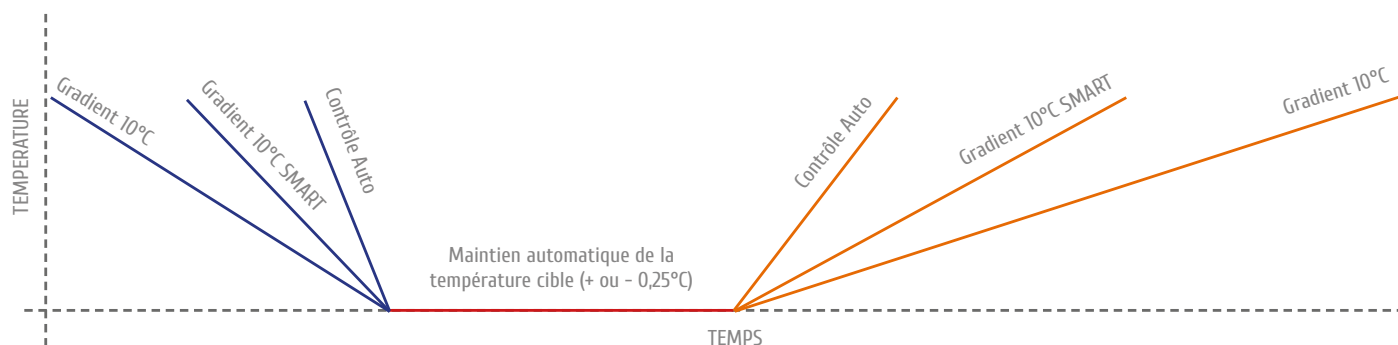

MODE MANUEL	MODE CONTROLE AUTOMATIQUE	MODE GRADIENT 10°C	MODE GRADIENT VARIABLE	OPTION SMART 5°C
<p>L'opérateur règle la température de l'eau (possibilité de réglage de 4°C à 42°C).</p> <p>Mode indépendant de la température du patient ; ce dernier doit alors être soumis à une surveillance stricte de la température.</p>	<p>Programmation par l'opérateur d'une température de consigne pour le refroidissement du patient.</p> <p>La gestion du refroidissement et du gradient eau/patient est alors gérée automatiquement par le Blanketrol.</p>	<p>Programmation par l'opérateur de la température de consigne pour le patient.</p> <p>La gestion du différentiel eau/patient est alors effectuée automatiquement par le Blanketrol dans la limite stricte de 10°C.</p>	<p>Programmation par l'opérateur de la température de consigne pour le patient ET du gradient eau/patient (entre 0 et 10°C); la gestion est ensuite effectuée automatiquement par le Blanketrol.</p>	<p>Avec l'option SMART, la différence entre la température de l'eau et celle du patient augmente ou diminue de 5 °C toutes les 30 minutes, jusqu'aux limites de la T°C de l'eau (4°C - 42 °C) ou jusqu'à ce que la température du patient atteigne le point de consigne.</p>

Le **Blanketrol® III** peut également être utilisé en **mode Surveillance** (pas de circulation , réchauffage ou refroidissement de l'eau)



COUVERTURES

ET MATELAS

KOOL-KIT™ : VESTES, JAMBIERES ET CASQUES - PATIENT UNIQUE



Facile à positionner

- Système Velcro®
- Matière non-tissée
- Pas d'adhésif au contact de la peau
- Usage patient unique, 10 à 12 jours

82900	Kool-Kit™ Complet (bas de corps, veste et tête)	5 / boîte
82910	Kool-Kit™ Tête (bas de corps et tête)	5 / boîte
82920	Kool-Kit™ Veste (bas de corps et veste)	5 / boîte
82950	Kool-Kit™ Néonatal (Maxi-Therm Lite®, sonde 9 Fr, mitaines, chaussons)	5 / boîte

MAXI-THERM® LITE : COUVERTURES ET MATELAS - PATIENT UNIQUE



Polyvalence

- Matière non-tissée
- Utilisable en matelas ou en couverture

82876	Maxi-Therm® Lite Adulte (162,6 x 63,5 cm)	10 / boîte
82874	Maxi-Therm® Lite Pédiatrique (83,8 x 63,5 cm)	10 / boîte
82873	Maxi-Therm® Lite Néonatal (45,7 x 31,8 cm)	10 / boîte
82800	Maxi-Therm® Lite Veste Patient	5 / boîte
82600	Maxi-Therm® Lite Tête Taille unique	10 / boîte

GELLI-ROLL® : MATELAS REUTILISABLES EN POLYMERE



Pratique

- Accès total au patient
- Simple à nettoyer
- Manipulation aisée

82199	Gelli-Roll® Adulte (186,7 x 54,6 x 1,6 cm)	à l'unité
82198	Gelli-Roll® Pédiatrique (79,4 x 60,3 x 1,6 cm)	à l'unité
82197	Gelli-Roll® Néonatal (50,8 x 33 x 1,6 cm)	à l'unité

BLANKETROL® III

Alarmes de
fonctionnement
visuelles
et sonores

Affichage de la
température
de l'eau

Réglage de
la température
consigne

Affichage de la
température
du patient

Mode manuel

Possibilité
de connecter
3 interfaces

Connexion de la
sonde température
patient

Mode
Automatique

Mode
Gradient 10°C

Mode
Variable

Option SMART



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Données

Dimensions	95,3 (H) x 43,2 (L) x 43,2 (P) cm
Surface au sol	0,19 m ²
Poids	59,4 kg à vide - 67 kg rempli
Capacité du réservoir	7,5 l d'eau distillée

Performances

Température	4 °C - 42 °C
Température du patient	30 °C - 40 °C
Élément chauffant	800 W
Débit	136,3 litres par heure
Alarmes	Limites de température

Références

87207	Système Blanketrol® III
86127	Logiciel d'export des données pour Blanketrol® III



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



- Tuyaux réutilisables
- Sondes

91824	Tuyau réutilisable de 2,7 m	à l'unité
91840	Tuyau réutilisable de 5,5 m	à l'unité
39412	Sonde oesophagienne/rectale	20 / boîte
39021	Sonde cutanée	20 / boîte

Fabrication :



Système de réchauffement et refroidissement par eau Blanketrol® III.
Dispositif médical de Classe IIb. CE0344. Organisme de certification : Dekra. Fabriqué par Gentherm Medical LLC. Non inscrit à la liste des produits et prestations remboursables prévue dans l'article L165-1 du code de la Sécurité Sociale. Pour un bon usage, lire attentivement la notice d'instruction. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

P0919A_v02 - 07/03/2023

Distribution :



31 rue des Alouettes - 95600 Eaubonne - France
www.gamida.fr | contact@gamida.fr
Tél. : 01 39 59 86 00 | Fax : 01 39 59 16 62