



PREPARER L'APPAREIL

- 1 Brancher l'appareil BLANKETROL® III sur le secteur
- 2 Connecter les tuyaux de jonction avec les consommables sur l'appareil
- 3 Vérifier le niveau d'eau (*stérile ou déminéralisée*) dans le réservoir sur l'arrière du BLANKETROL III® :
Faire le plein ou ajuster le niveau


L'eau doit effleurer la grille de remplissage
- 4 Connecter le ou les consommables au(x) tuyau(x)
- 5 Brancher le câble de connexion à la sonde de T° et positionner la sonde de T° sur le patient (T° centrale)
- 6 Mettre le BLANKETROL III® sous tension

MODE AUTOMATIQUE

REFROIDISSEMENT DU PATIENT

Ce mode ne peut être utilisé qu'avec une
T° Consigne > 30°C

Si la **T° Consigne < 30°C**, une Alarme se déclenche et l'Appareil ne fonctionne pas.

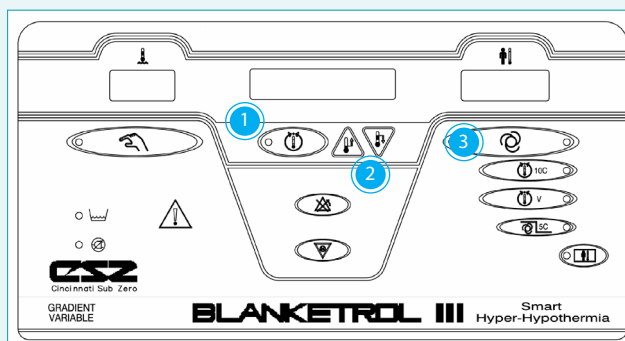

- 1 Accès au réglage de la T° Consigne
- 2 Réglage de la T° Consigne avec les boutons «haut» et «bas»
- 3 Sélection du mode **automatique**


Commencer le traitement
Monitoring de la T° Patient

Dès que la T° Patient approche de la T° Consigne ± 1°C (60-90 min),

>> Passer au MODE 10C


MODE 10C

PROTOCOLE DE RÉGULATION

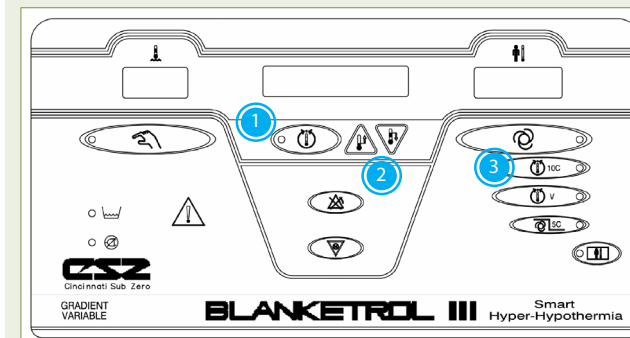


- 1 Accès au réglage de la T° Consigne
- 2 Réglage de la T° Consigne avec les boutons «haut» et «bas»
- 3 Sélection du mode **10C**

Ce mode peut être utilisé en combinaison avec l'option « SMART 5°C »

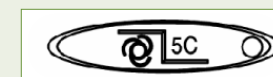

MODE VARIABLE

PROTOCOLE DE RÉCHAUFFEMENT DU PATIENT

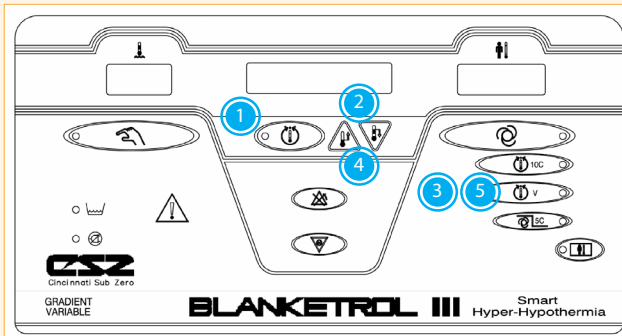

- 1 Accès au réglage de la T° Consigne
- 2 Réglage de la T° Consigne avec les boutons «haut» et «bas»
- 3 Sélection du mode variable
- 4 Ajuster le gradient souhaité

Si on souhaite un réchauffement de 0,44°C/h, choisir 3°C.

- 5 Valider

Ce mode peut être utilisé en combinaison avec l'option « SMART 5°C »



OPTION SMART 5°C

SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE

L'option « SMART » est un mode de sécurité qui assure une gestion plus complète de la T° Patient et de la T° Consigne. Elle s'associe avec les modes 10C et Variable.

- 1 Accès au réglage de la T° Consigne
- 2 Réglage de la T° Consigne avec les boutons «haut» et «bas»
- 3 Sélection du mode
 10C
 VARIABLE
- 4 Activer l'option «SMART 5°C»

En Mode VARIABLE, ajuster le gradient souhaité comme précédemment


A partir de cet instant, l'appareil contrôle la T° Patient et la T° Consigne toutes les 30 min.

MODE MANUEL

NE JAMAIS UTILISER CE MODE LORSQU'UN PATIENT EST EN CONTACT AVEC LES CONSOMMABLES.

PAS DE GESTION DE LA T° PATIENT

Lorsque ce mode est sélectionné, il est possible de programmer une température jusqu'à 4°C

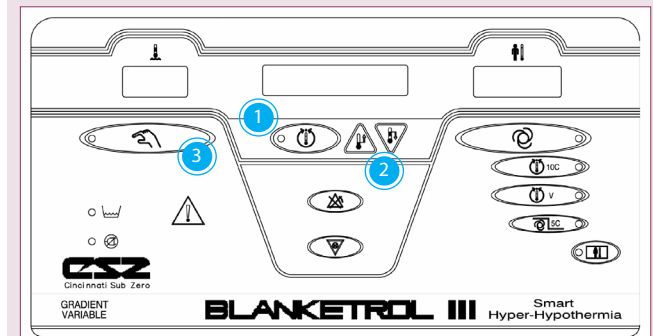

- 1 Accès au réglage de la T° Consigne
- 2 Réglage de la T° Consigne avec les boutons «haut» et «bas»
- 3 Sélection du mode manuel