

Transfert



DRAPS DE TRANSFERT

Pour le transfert des patients du lit vers le chariot douche.

3700.38 / 3700.39 / 8200.32

UTILISATION

Vérifier avant chaque utilisation le bon état du drap.

Positionnement du drap :

1. Latéraliser le patient afin de passer le drap entre le patient et le lit.
2. Rabattre la barrière de protection du chariot douche.
3. Amener le chariot au-dessus du matelas.
4. Approcher le chariot douche contre le lit, le matelas se situe en partie sur le lit.
5. Rabattre la barrière de protection du lit.
6. Descendre le plateau du chariot afin de comprimer le matelas du lit.
7. Enclencher les freins des roulettes du chariot douche.
8. Vérifier également que les freins des roulettes du lit soient bien enclenchés.
9. Veiller à la sécurité du patient avant et pendant le transfert.
10. Procéder au transfert du malade du lit vers le chariot douche.

DIFFÉRENTES TAILLES DISPONIBLES

- Réf : **3700.38** Dimensions **90cm X 200cm**
- Réf : **3700.39** Dimensions **140cm X 200cm**
- Réf : **8200.32** Dimensions **120cm X 70cm**

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : 100% Polyester



Facilite et optimise
les phases de
transfert

Transfert

Produit
sélectionné par



DRAPS DE TRANSFERT

Pour le transfert des patients du lit vers le chariot douche.

3700.36 / 3700.38 / 3700.39

UTILISATION

Vérifier avant chaque utilisation le bon état du drap.

Positionnement du drap :

1. Latéraliser le patient afin de passer le drap entre le patient et le lit.
2. Rabattre la barrière de protection du chariot douche.
3. Amener le chariot au-dessus du matelas.
4. Approcher le chariot douche contre le lit, le matelas se situe en partie sur le lit.
5. Rabattre la barrière de protection du lit.
6. Descendre le plateau du chariot afin de comprimer le matelas du lit.
7. Enclencher les freins des roulettes du chariot douche.
8. Vérifier également que les freins des roulettes du lit soient bien enclenchés.
9. Veiller à la sécurité du patient avant et pendant le transfert.
10. Procéder au transfert du malade du lit vers le chariot douche.

DIFFÉRENTES TAILLES DISPONIBLES

- Réf : **3700.36** Dimensions **120cm X 70cm**
- Réf : **3700.38** Dimensions **90cm X 200cm**
- Réf : **3700.39** Dimensions **140cm X 200cm**

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : 100% Polyester



**Facilite et optimise
les phases de
transfert**