

Test des soudures de sachets

Tests d'intégrité des soudures « Liquid Control »



- Test avec une solution bleutée mettant en évidence les canaux et les défauts des soudures de manière rapide et fiable.
- Selon la norme DIN EN ISO 11607

2 conditionnements :

- + Poche jetable à placer dans le sachet à tester. Après scellage, appuyer sur la poche pour la percer.
- + Flacon dans lequel le colorant est pipeté. Déverser le liquide dans le sachet avant de réaliser la soudure.

Réf.	Matériau de l'emballage à tester	Format du test	Unité/boîte	€/boîte
019671	Papier/plastique	Poche de colorant jetable	30	NC -
019672	Tyvek/plastique	Poche de colorant jetable	30	NC -
019683	Papier/plastique	Kit : 1 flacon 75mL de colorant + 1 bécher + 20 pipettes	1	NC -

Tests de scellage papier en routine



- Tests utilisés pour le contrôle en routine du bon fonctionnement de votre thermosoudeuse.
- La bandelette test, placée « en sandwich » entre les 2 faces de l'emballage, détectera clairement les irrégularités et les endommagements de la soudure.
- 2 références selon le matériau des emballages à tester
- Dimensions bandelettes : 173 x 75 mm
- Selon la norme DIN EN ISO 11607

Réf.	Matériau de l'emballage à tester	Bandelettes/boîte	€/boîte
019673	Papier/plastique	30	NC -
019674	Tyvek/plastique	30	NC -

Tests de contrôle des charges lors d'une stérilisation à la vapeur - conforme DIN 867-5



- Tests spécialement conçus pour le contrôle des charges lors d'une stérilisation à la vapeur. Le corps du test (Dispositif d'Épreuve de Procédé - DEP) en aluminium simule des dispositifs médicaux creux difficiles à stériliser. Il comporte un tube, appelé hélix, à une de ses extrémités se trouve un indicateur chimique sous la forme d'une bandelette-test qui sera positionnée dans une capsule en plastique. Le corps du DEP est réutilisable. La manipulation du Batch Monitoring Systems stericlin® est simple et permet de gagner du temps et de la place :

- Insérer la bandelette-test dans la capsule
- Visser la capsule sur le corps du DEP
- Lancer le programme de stérilisation
- Enlever la bandelette-test
- Vérifier le résultat

Réf.	Unité d'utilisation	Kit/carton	€/carton
019773	Kit starter : 1 DEP en aluminium + 2 capsules à vis + 250 bandelettes-test	1	NC -
019774	Kit starter : 1 DEP en aluminium + 2 capsules à vis + 50 bandelettes-test	1	NC -
019775	250 bandelettes-test avec indicateur 76,5 x 5,5mm + 1 capsule à vis	1	NC -
019776	50 bandelettes-test avec indicateur 76,5 x 5,5mm + 1 capsule à vis	1	NC -