


## Prélèvement sang veineux – S-Monovette® Héparine de Lithium – Code ISO 6710:2017

Fiche créée le: 31/07/2025

Dernière modification le : 13/03/2025



Étiquette plastique

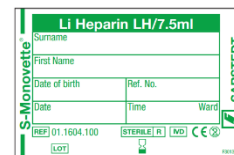

Étiquette papier

**Désignation commerciale :** S-Monovette® - Héparine de Lithium – Bouchon vert

**Application :** Prélèvement sanguin veineux pour analyses sur plasma

**Fabricant :** SARSTEDT AG & Co.KG D-51582 NUMBRECHT – Allemagne  
Certification ISO 13485

### Caractéristiques produit :

- **Description :** Tube S-Monovette® pour prélèvement sanguin veineux sur Héparine de Lithium pour analyses sur plasma, avec étiquette plastique transparente ou papier verte
- **Normes et directives :** Dispositif Médical de Diagnostic *In Vitro* conforme au règlement européen 2017/746
- **Matière :**

Tube :	Polypropylène PP
Bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE) + colorant vert
Membrane	Caoutchouc naturel sans latex
Embout Piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Tige piston	Polystyrène
Étiquette	Plastique transparente ou papier colorée, graduée au volume nominal
- **Additifs :** Billes coatées avec Héparine de Lithium sous forme sèche  
Dosage : 16 UI/ml de sang à l'exception des références 04.1906100 (20 UI/ml) et 06.1666100 (35 UI/ml)
- **Conditionnement :** Carton de 10 boîtes de 50 S-Monovette®, soit 500 pièces
- **Numéro de lot :** Situé sur chaque S-Monovette®, boîte et carton
- **Date limite d'utilisation :** Sur chaque S-Monovette®, boîte et carton  
Durée de vie : 36 mois en sortie de production
- **Qualités biologiques :** Stérile par irradiation

**Prélèvement sang veineux – S-Monovette® Héparine de Lithium – Code ISO 6710:2017****Référencement des tubes S-Monovette® :**

Référence Etiquette papier	Référence Etiquette plastique	Volume de remplissage	Ø	Longueur hors bouchon	Longueur totale
01.1604100	-	7,5 ml	15 mm	92 mm	108 mm
03.1628100	-	5,5 ml	15 mm	75 mm	91 mm
04.1936100	-	4,9 ml	13 mm	90 mm	106 mm
04.1920100	-	4,0 ml	13 mm	75 mm	91 mm
04.1929100	-	2,7 ml	13 mm	75 mm	91 mm
05.1553100	-	2,7 ml	11 mm	66 mm	82 mm
04.1906100	-	2,6 ml	13 mm	65 mm	81 mm
-	04.2913200	1,6 ml	13 mm	75 mm	91 mm
06.1666100	-	1,2 ml	8 mm	66 mm	82 mm

**Limites d'utilisation - Recommandations :**

Usage unique.

Pour prélèvement sanguin veineux uniquement.

Absence de latex.

Manipulations d'ouverture et fermeture sécurisées grâce au bouchon coiffant vissant, réalisables manuellement ou automatiquement sur les chaînes pré-analytiques et systèmes de débouchage ou rebouchage automatisés.

Respecter le mode d'emploi situé sur chaque boîte de S-Monovette® pour le prélèvement par aspiration ou par technique sous-vide.

Bien remplir au trait de jauge.

Après le prélèvement, mélanger avec précaution par retournements.

**Stockage**

Les tubes S-Monovette® doivent être stockés avant leur utilisation dans un environnement dans lequel la plage de températures s'étend de 4 à 25°C. Une qualité constante tout au long de la durée de vie est garantie par des conditions de stockage optimales. Par conséquent, les produits doivent, par principe, être protégés des températures extrêmes et des intempéries, ainsi que de l'humidité et des rayons UV.

**Étanchéité**

Les tubes S-Monovette® sont validés comme récipients primaires étanches en conformité avec l'Instruction d'emballage ADR-P650. Ils sont résistants sans fuite à une différence de pression d'au moins 95 kPa (0,95 Bar).

## Prélèvement sang veineux – S-Monovette® Héparine de Lithium – Code ISO 6710:2017

### Centrifugation

Centrifugation : veuillez consulter nos recommandations à l'adresse :

[www.sarstedt.com/fr/service/centrifugation](http://www.sarstedt.com/fr/service/centrifugation)

Pour un maximum de flexibilité, nous avons révisé méticuleusement nos recommandations de centrifugation actuelles et avec un regard particulier sur les hautes vitesses de centrifugation.

Notre outil de sélection, simple d'utilisation, vous donnera accès :

- ⇒ à la durée de centrifugation en sélectionnant une vitesse souhaitée
- ⇒ à la vitesse si vous sélectionnez une durée de centrifugation