

## ERGO 300

### Guide de démarrage rapide



## Unité de transmission

Ø 12 mm 905-212  
Ø 15 mm 905-215

905-004

Ø 12 mm 905-622  
Ø 15 mm 905-625

Ø 12 mm 905-012  
Ø 15 mm 905-015

1. Monter le tube de protection à l'avant de l'unité d'entraînement. Une fois le tube de protection monté, tourner en position « NO CUT ».

2. Introduire le tube coupant du côté proximal dans l'unité de transmission.

3. Placer un joint de couvercle dans le bouchon joint avant. Un creux correspondant est visible.

4. Placer un joint rond dans le bouchon fileté arrière. Un creux correspondant est visible.

5. Enfiler la gaine de la poignée sur la tige de l'unité de transmission jusqu'au clic audible. Pour le retrait de la poignée, soulever légèrement le levier de blocage.


905-005

6. Clipser l'unité de transmission et le micromoteur pour les raccorder.

905-002

Sélectionner les touches

**Mode et Med**

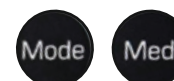

### Assemblage micromoteur

- Visser le bouchon avant à l'aide du filetage.
- Connecter le câble du micromoteur au moteur conformément aux tiges de contact et le sécuriser par vissage.



905-001