

## Filtre poussière chaux sodée pour ventilateur PERSEUS A 500 / Zeus IE

### Fiche Technique

Ce matériel doit être utilisé par du personnel médical ou para médical.

#### Références :

MX 50 115 (jeu de 5)

#### Dénomination commerciale :

Filtre interne du bac à chaux pour respirateurs d'anesthésie  
Dräger Perseus A 500 & Zeus équipé TurboVent 2 (Zeus fabriqué après Février 2008).

#### Descriptif du produit :

Jeu de 5 filtres internes du bac à chaux sodée  
-Diamètre 10,5cm

#### Classe DM : I

Numéro organisme notifié : CE0123

Date de 1ère mise sur le marché dans UE : 2011

#### Modalités d'utilisation :

Ce filtre contribue à retenir la poussière produite par la chaux sodée versée dans le bac et protège ainsi les organes internes du respirateur d'anesthésie.

Il doit impérativement être changé lors de chaque remplissage du bac.

#### Conditionnement :

Boîte de 5 unités, produit non stérile, livré médicalement propre.



#### Précautions particulières :

Après usage, les produits doivent être mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans l'hôpital

Réutilisation, nettoyage, désinfection, stérilisation strictement interdits.

Dans tous les cas, merci de bien vouloir vous référer à la notice d'utilisation de l'appareil et du dispositif.

Fabricant du DM : Drägerwerk AG & Co. KGaA  
23542 Lübeck (Allemagne)