

Pak Vitrectomie pour Constellation® Pak Vitrectomie Total Plus Combiné UltraVit 10 000 cpm Bevel Tip Grand Angle Valvé 0.9 mm MicroSmooth 25+G

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Date d'édition : 19 mars 2018

1.1	Nom : Laboratoires ALCON	
1.2	Adresse complète : 20, rue des Deux Gares 92842 RUEIL MALMAISON cedex	Tel: 01.47.10.47.10 Fax : 01.47.10.47.00 E-mail : Pour toute commande : chirurgie.commande@alcon.com Pour toute autre demande : serviceclient.chirurgie@alcon.com Site internet : www.alcon.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance :	Tel : 01.47.10.47.58 Fax : 01.47.10.27.70 e-mail : Vigilances.France@alcon.com

2. Informations sur dispositif ou équipement

2.1	Dénomination commune : Pak Vitrectomie
2.2	Dénomination commerciale : Pak Vitrectomie, Total Plus Combiné UltraVit 10 000 cpm Bevel Tip Grand Angle Valvé 0.9 mm MicroSmooth 25+G pour Constellation
2.3	Code nomenclature : 45150 Code Cladimed : S50AE02
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1
2.5	Classe du DM : IIb Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE Selon Annexe n° II Numéro de l'organisme notifié : 0123 (TÜV) Date de première mise sur le marché dans l'UE : Fabricant du DM : Laboratoires Alcon
2.6	Descriptif du dispositif : Pack complet pour la chirurgie du segment postérieur. Éléments à préciser : Equipé du système RFID. Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. Trousse : Oui/ ☒ Non Si Oui : Composition de la trousse

2.7 Références Catalogue : 8065752451

RÉFÉRENCE : 8065752451 : PAK TTP CB 10K V GA 0.9 25+ 6-B**Conditionnement / emballages**

UCD (Unité de Commande) :	1	Boite
CDT (Conditionnement)	6	Unités
QML (Quantité minimale de livraison) :	1	Boite

Descriptif de la référence :

Cassette combinée avec sac de recueil
Sonde de vitrectomie Ultravit 10 000 cpm avec embout biseauté munie du système RFID
Fibre optique droite grand angle munie du système RFID
Tubulure d'infusion et tubulure d'air
Terminal d'infusion 4 mm auto stable
Tubulure d'extrusion
Couteaux montés d'un trocart
Robinet 3 voies
Cache écran stérile
Seringue 20 cc.
Connecteurs divers
Poche stérile pour plateau
Chambre test
Tubulure d'irrigation
Tubulure I/A phaco
Clef de serrage pour embout I/A
Manchons pour embouts

Caractéristiques de la référence : 25+G**Etiquetage :**

2.8 Composition du dispositif et Accessoires :

ÉLÉMENTS :

MATERIAUX :

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Absence de latex

Absence de caoutchouc naturel sec

2.9 Domaine - Indications :

Domaine d'utilisation (selon liste Europharmat) : Chirurgie vitréo-rétinienne / segment postérieur

Indications (selon liste Europharmat) :

Le pack procédure combinée Constellation TOTAL PLUS contient le matériel stérile à usage unique nécessaire pour effectuer une procédure combinée. La procédure combinée couvre les opérations du segment antérieur et du segment postérieur.

3. Procédé de stérilisation

DM stérile : Oui

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'Éthylène

Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu.

4. Conditions de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation et de stockage

5. Sécurité d'utilisation

5.1 **Sécurité technique** : cf. Notice

5.2 **Sécurité biologique (s'il y a lieu)** :

6. Conseils d'utilisation

6.1 **Mode d'emploi** : cf. Notice

6.2 **Indications** : Chirurgie du segment postérieur et antérieur (combinée)

6.3 **Précautions d'emploi** : Usage unique

6.4 **Contre-Indications** : Usage unique, ne pas restériliser. Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage.

7. Informations complémentaires sur le produit

Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)

- ✓ Photos
- ✓ DFU



Pak Vitrectomie Total Plus Combiné UltraVit 10 000 cpm Bevel Tip
Valvé Grand Angle 0.9 mm MicroSmooth 25+G

Mode d'emploi

Description : Les packs **Constellation*** totAL pLUs avec rFID enGAUGE sont disponibles dans trois (3) configurations : Pack vitrectomie **Constellation totAL pLUs**, pack Phaco **Constellation** et pack procédure combinée **Constellation totAL pLUs**. Chaque pack contient le matériel stérile à usage unique nécessaire pour effectuer respectivement une opération du segment postérieur, une opération du segment antérieur, ou une procédure combinée. La procédure combinée couvre les opérations du segment antérieur et du segment postérieur. La disponibilité des composants individuels dépend de la configuration du pack.

rFID enGAUGE

Les accessoires du pack **Constellation** disposent d'un dispositif d'identification par Fréquences Radio (RFID) pour l'identification du port de connexion. L'anneau entourant le port de la console d'allume lorsque le dispositif **rFID enGAUGE** est défectueux. Cet anneau lumineux "VERT" lorsque le dispositif est connecté au port approprié, et en "ORANGE" lorsque le dispositif n'est pas connecté correctement lorsque l'identification RFID n'est pas reconnue. La cassettes du connecteur RFID aggloméré avec une barrière aseptique. La connexion à la console peut ainsi être effectuée par l'instrumentiste.

Mode d'emploi **ALCANTARA** Set Canule de Trocart avec Valve (pas inclus dans tous les packs)

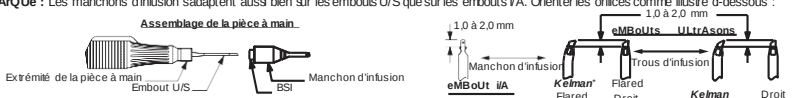
Il faut faire attention lors de l'insertion de l'instrument dans la Canule de Trocart avec Valve. Les instruments couverts comme les vitrectomes ne doivent pas être avancés lors du passage à travers la valve de la Canule pour Trocart afin d'éviter de couper la membrane de la valve. Le système de mise à l'air pour Canule de Trocart avec Valve peut être inséré dans la Canule de Trocart avec Valve afin de remettre à pression les fluides ou les gaz si nécessaire.

Instructions d'utilisation du pack

Les instructions des composants applicables aux trois configurations de packs s'appliquent conjointement. Pour l'installation du pack Procédure combinée, suivez les instructions d'amorçage et d'installation des opérations du segment postérieur et du segment antérieur. Pour tous les autres suppléments dans l'installation de la console, appuyez sur le bouton d'installation (Setup) de l'écran de contrôle de la console et référez-vous à l'utilisation.

procédure d'installation du pack et de la cassette	
1. Scanner le code barre sur le pack et les accessoires à utiliser à l'aide du scanner de code barre situé à l'arrière de la console du Constellation . Vérifier sur l'écran d'installation que le pack approprié est ajouté sur la liste des consommables et que les accessoires appropriés sont indiqués sur l'écran. Si le code barre n'est pas reconnu par le système, alors un message d'avertissement est affiché avec un signal sonore. L'écran d'instructions fournira des options.	Infirmier(e) de bloc ou instrumentiste en non stérile
2. Ouvrir le pack et transférer les composants vers le champ stérile de façon aseptique.	Infirmier(e) de bloc
3. Couvrir le moniteur avec la housse burnée. Couvrir le bras support du plateau avec la housse pour bras support du plateau Constellation (REF: 8065751163) si applicable.	Instrumentiste
4. Installer la cassette en insérant la base de la cassette dans le module fluide de la console. Pousser la cassette dans le module à l'aide de la poignée. S'assurer que la poche de recueil prend librement.	Instrumentiste
5. Dérouler les tubulures d'intubation des connecteurs pour compression (gris) et des ports pour infusion (rouge) de la cassette. Les ports présentent un code couleur et sont bloqués pour faciliter l'identification. Insérer les connecteurs dans les ports de la cassette et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient totalement engagés.	Instrumentiste
6. Agiter la chambre à gouttes sur la ligne d'administration pour s'assurer qu'elle est bien agitée. Présenter directement la ligne d'administration à l'infirmier(e) de bloc ou poser la ligne d'administration sur le crochets de la bouteille pour y être repris par l'infirmier(e) de bloc.	Instrumentiste
7. Retirer le capuchon protecteur de la chambre à gouttes et percer de façon aseptique le flacon d'irrigation avec le dispositif de perçage de la chambre à gouttes. Appuyer sur la chambre à gouttes pour la remplir approximativement aux 2/3 et jusqu'à 3/4 au maximum.	Infirmier(e) de bloc
8. Pour le pack vitrectomie Constellation totAL PLUS et le pack procédure combinée Constellation totAL PLUS , suivre la section Procédure d'installation pour opération du segment postérieur. Pour le pack Phaco Constellation , passer directement à la section Procédure d'installation pour opération du segment antérieur.	Instrumentiste

procédure d'installation pour opération du segment postérieur	
1. Connecter les tubulures d'intubation au port d'infusion (vert foncé) et au port LPAS (Blanc) de la cassette. Les connecteurs et les ports de la cassette présentent un code couleur et sont bloqués pour faciliter l'identification. Insérer les connecteurs dans les ports de la cassette et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient totalement engagés.	Instrumentiste
2. Ouvrir le compartiment sur le côté du plateau d'amorçage de la canule d'infusion pour accéder aux tubulures et à l'adaptateur luer. Tout en maintenant la canule d'infusion connectée au plateau d'amorçage, connecter l'adaptateur luer à la valve au fluide (verte) ou au robinet d'arrêt. Placer le plateau d'amorçage sur une surface plane pour préparer l'amorçage et la calibration.	Instrumentiste
3. Connecter la ligne d'aspiration de la sonde de vitrectomie au port d'aspiration 1 (bleu foncé) de la cassette.	Instrumentiste
4. Connecter les lignes de commande au port UltraVitrHyperVitr à la console.	Instrumentiste ou Infirmier(e) de bloc
reMARQUE : La collerette du connecteur agit comme une barrière aseptique ; cette opération peut ainsi être effectuée par l'instrumentiste. Pour les sondes UltraVitrHyperVitr à fréquence de coupe élevée avec rFID enGAUGE , l'anneau autour du port s'allume en vert lorsque la connexion est correcte.	
5. Pour le pack vitrectomie uniquement, connecter la ligne d'aspiration auxiliaire au port d'aspiration 2 (bleu clair). Connecter l'accessoire d'extrusion (pièce à main ou canule) à la ligne d'aspiration auxiliaire (bleu clair). Si une procédure chirurgicale de fragmentation du cristallin doit être réalisée, connecter la pièce à main de fragmentation Constellation (REF: 8065750889) à la ligne d'aspiration auxiliaire à la place de l'accessoire d'extrusion en utilisant un adaptateur luer femelle/femelle. Se référer au mode d'emploi du pack de fragmentation Constellation pour les instructions d'installation.	Instrumentiste
6. Placer la sonde de vitrectomie et l'accessoire d'extrusion ou de fragmentation dans une coupelle ou un drap stérile pour recueillir les fluides de l'amorçage. Le volume de fluide exposé est minime.	Instrumentiste
7. Dérouler avec précaution la sonde endoluminale et la bancher sur le connecteur d'illumination appropriée de la console. Vérifier qu'elle est bien ajustée dans le connecteur.	Instrumentiste ou Infirmier(e) de bloc
reMARQUE : La collerette du connecteur agit comme une barrière aseptique ; cette opération peut ainsi être effectuée par l'instrumentiste.	
8. Dans les cas de procédure combinée, poursuivre par la procédure d'amorçage et d'installation pour opération du segment antérieur.	Instrumentiste / Infirmier(e) de bloc
9. Appuyer sur le bouton Démarrer amorçage (Start Prime) sur l'écran de contrôle tactile et initier l'amorçage et le test.	Instrumentiste
reMARQUE : Il n'est pas nécessaire de remplir la coupelle stérile utilisée pour l'amorçage, à moins que la fonction d'amorçage par poussée soit activée. L'amorçage par poussée est activé suite à une manœuvre d'aspiration pour éviter la contamination des accessoires. Laisser la séquence d'amorçage et de calibration s'achever. Ce processus peut prendre 1-2 minutes, et il faut faire attention à ne pas heurter les tubulures et les pièces à main pendant l'amorçage ou la mise en phase.	
10. Après avoir achevé l'installation, la console passe automatiquement en mode Chirurgie .	Instrumentiste

procédure d'installation pour opération du segment antérieur	
1. Connecter les tubulures d'irrigation/aspiration au port d'irrigation (vert clair) et au port d'aspiration 2 (bleu clair) de la cassette. Les connecteurs et les ports de la cassette présentent un code couleur et sont bloqués pour faciliter l'identification. Insérer les connecteurs dans les ports de la cassette et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient totalement engagés.	Instrumentiste
2. Visser l'embout U/S sur la pièce à main U/S. Serrer fermement à l'aide de la clé support d'embout. Relier le désupport d'embout et la conserver pour la dépose ultérieure de l'embout. Pour les embouts WIPIT Macdonald uniquement, avant utilisation, vérifier que le tube de polymère est présent et qu'il est bien positionné. Faire coincer la tige de l'embout ultrasons avec le manchon d'infusion correspondant comme décrit dans les recommandations de la section Mises en garde. Monter le manchon d'infusion avec BSI sur la pièce à main U/S, autour de l'embout U/S. Le extrémité de l'embout U/S doit dépasser de l'extrémité du manchon d'environ 1,2 mm. Éviter de tordre le manchon.	Instrumentiste
reMARQUE : Les manchons d'infusion adaptés sont bien sur les embouts U/S que sur les embouts I/A. Orienter les orifices comme illustré ci-dessous :	
Assemblage de la pièce à main 	
3. Connecter le raccord luer mâle blanc de la ligne d'irrigation et le raccord luer femelle bleu de la ligne d'aspiration à la pièce à main U/S. Glisser la chambre test sur le manchon d'infusion. Installer la pièce à main sur le bras support du plateau de la console. Si est disponible.	Instrumentiste
4. Appuyer sur le bouton Démarrer amorçage (Start Prime) sur l'écran de contrôle tactile et initier l'amorçage et la mise en phase de la pièce à main. Ce processus peut prendre 1-2 minutes, et il faut faire attention à ne pas heurter les tubulures et les pièces à main pendant l'amorçage ou la mise en phases.	Instrumentiste ou Infirmier(e) de bloc
5. Après avoir achevé l'installation, la console passe automatiquement en mode Chirurgie .	Instrumentiste
6. Avant de commencer l'intervention, enfiler la pédale en position 1 pour que la solution sécoule de l'orifice d'irrigation et activer la fonction de reflux pour que la solution d'irrigation s'écoule par l'orifice d'aspiration. Observer le flux de solution d'irrigation qui sécoule par les orifices d'irrigation et d'aspiration. Si le flux de solution d'irrigation est faible ou même nul, l'efficacité des fluides sera fortement compromise.	Instrumentiste
7. Visser l'embout U/S sur la pièce à main U/S. Serrer fermement à l'aide de la clé support d'embout. Relier la clé support d'embout à la dépose ultérieure de l'embout. Monter le manchon d'infusion sur la pièce à main autour de l'embout U/S. L'extrémité de l'embout U/S doit dépasser de l'extrémité du manchon d'environ 1,2 mm. Éviter de tordre le manchon. Orienter les orifices comme illustré ci-dessous : Faire coincer la tige de l'embout ultrasons avec le manchon d'infusion correspondant comme décrit dans les recommandations de la section Mises en garde. Monter le manchon d'infusion avec BSI sur la pièce à main U/S, autour de l'embout U/S. Le extrémité de l'embout U/S doit dépasser de l'extrémité du manchon d'environ 1,2 mm. Éviter de tordre le manchon.	Instrumentiste
8. Lorsque l'on est dans l'état de l'opération, sélectionner le mode U/S. Enfoncer la pédale en position 1 pour que la solution d'irrigation s'écoule de l'orifice d'irrigation et activer la fonction de reflux pour que la solution d'irrigation sécoule de l'orifice d'aspiration de l'embout U/S. Observer le flux de solution d'irrigation qui sécoule par les orifices d'irrigation et d'aspiration. Si le flux de solution d'irrigation est faible ou même nul, l'efficacité des fluides sera fortement compromise.	Instrumentiste

remplacement de la poche de recueil	
1. Lorsque la poche de recueil de la cassette est pleine, elle doit être remplacée par la poche de recueil de rechange Constellation (806793.162). Les poches de recueil de rechange Constellation sont fournies avec les Sasserues que les fondions vide et de nettoyage ne sont pas activées lors du retrait et de l'installation des poches de recueil.	Infirmier(e) de bloc
2. Retirer d'abord la poche de recueil du crochet pour poche sur la cassette.	Infirmier(e) de bloc
3. Puis retirer le passant de la poche de recueil de l'orifice de drainage pour détacher complètement la poche de recueil de la cassette. remARque : Un léger mouvement de rotation peut être nécessaire pour casser la connexion entre le passant et l'orifice de drainage.	Infirmier(e) de bloc
4. Installer la nouvelle poche de recueil en l'acrochant d'abord sur le crochet pour poche de la cassette.	Infirmier(e) de bloc
5. Insérer le passant dans l'orifice de drainage de la cassette. Enfoncer délicatement le passant pour s'assurer qu'il est engagé et pour éviter les fuites.	Infirmier(e) de bloc

ATTENTION

1. Aux états-Unis, la loi restreint la vente de ce dispositif, soit directement par les médecins, soit sur leur prescription (sur prescription seulement).
2. Le mode d'emploi du pack ne dispense pas de lire et de comprendre le manuel d'utilisation du **Constellation**. ce manuel, fourni avec l'appareil, comporte des informations détaillées permettant à l'équipe chirurgicale de se familiariser avec les commandes et fonctions de l'appareil.
3. L'utilisation de ce dispositif peut demander la mise en place d'ajustements chirurgicaux, s'assurer que les réglages du système chirurgical **Constellation** correspondent bien au pack **Constellation**. Avant la première utilisation, contactez votre représentant commercial Alcon pour les informations de mise en service (Aux états-Unis, appeler le 800-to-Alcon ou 817-293-0450. Hors états-Unis, contactez votre représentant commercial Alcon).

USES EN GARDE!

1. si l'un des composants du pack est endommagé à réception, avant l'Alcon immédiatement, n'utilisez aucun des composants si l'emballage de stérilité est endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter :

Pour la France :
téléphone : 0.800.07.14.27 (Service Clients)
01.47.10.47.58 (Matériovigilance)
Mail : valigances@alcon.com
courrier :

Pour la Belgique et le Luxembourg :
02.754.32.10

Pour la Suisse :

Alcon NV
Mediaalaan 36
B-1800 VILVOORDE

Alcon Switzerland SA
Suurstadli 14
CH-6343 ROTREUZE

chaque pack est identifié par un numéro de lot qui permet la traçabilité et doit être rappelé lors de toute discussion avec le service clients au sujet du pack.

1. Un usage ou un assemblage incorrect est susceptible de mettre le patient en danger. Un mauvais appariement des consommables et l'utilisation de réglages qui ne sont pas spécialement adaptés pour une combinaison particulière de consommables peut être dangereux pour le patient.
2. Vérifier visuellement que le flux d'insufflation d'air et de fluide est adéquat avant d'introduire la canule d'insufflation dans l'œil.
3. ne pas faire fonctionner la sonde de vitrométrie dans l'air. ceci peut affecter les performances du système et/ou être potentiellement dangereux.
4. remplacer la sonde de vitrométrie si l'une des situations suivantes est observée :
 1. Une quantité excessive de bulles d'air se trouve dans la ligne d'aspiration.
 2. Des bulles d'air sortent de l'orifice de coupe.
 3. La guilotine ne se ferme pas complètement ou ne bouge pas lorsque la sonde est en marche.
 4. L'orifice de coupe n'est pas ouvert lorsque la sonde est au repos.
 5. si une réduction des capacités de coupe ou d'aspiration apparaît pendant l'intervention chirurgicale, arrêter immédiatement et remplacer la sonde.
5. Minimiser l'intensité de la lumière et la durée d'exposition de la rétine afin de réduire les risques de lésions de la zone rétinienne.
6. Un usage ou un assemblage incorrects sont susceptibles de mettre le patient en danger :
 - Un mauvais appariement des consommables et/ou l'utilisation de réglages qui ne sont pas spécialement adaptés pour une combinaison particulière de consommables peuvent engendrer un déséquilibre fluïdique, potentiellement dangereux.
 - L'utilisation de pièces à main non approuvées peut engendrer un déséquilibre fluïdique, potentiellement dangereux.
 - L'utilisation d'incisions plus petites que celles recommandées peuvent entraîner des dommages mécaniques et/ou thermiques des tissus oculaires.

Manchon d'insufflation / type	couleur du manchon	embouts recommandés	taille d'incision recommandée
Manchon à haute insufflation de 1,1 mm	Bleu clair	Embouts de 1,1 mm et ABS de 1,1 mm, Flared ABS de 1,1 mm, Standard IA, Silicone IA, INTREPID IA	3,2 mm
Manchon de 1,1 mm	Bleu foncé	Embouts de 1,1 mm et ABS de 1,1 mm, Flared ABS de 1,1 mm, Standard IA, Silicone IA, INTREPID IA	3,0 mm
Micro-manchon de 1,1 mm	Bleu/Vert	Embouts de 1,1 mm et ABS de 1,1 mm, Flared ABS de 1,1 mm, Standard IA, Silicone IA, INTREPID IA	2,75 mm
Ultra-manchon de 1,1 mm	Vert	Flared ABS de 1,1 mm, Silicone IA, INTREPID IA	2,2 mm
Nano-manchon de 1,1 mm	Vert clair	Flared ABS de 1,1 mm, Silicone IA, INTREPID IA	1,8 mm
Manchon à haute insufflation de 0,9 mm	Violet clair	Embouts de 0,9 mm et ABS MicroTip de 0,9 mm, Tapered ABS MicroTip de 0,9 mm, Flared ABS MicroTip de 0,9 mm, Embouts ABS Mini et MiniFlared ABS de 0,9 mm, Standard IA, Silicone IA, INTREPID IA	3,2 mm
Micro-manchon de 0,9 mm	Violet foncé	Embouts de 0,9 mm et ABS MicroTip de 0,9 mm, Tapered ABS MicroTip de 0,9 mm, Flared ABS MicroTip de 0,9 mm, Embouts ABS Mini et MiniFlared ABS de 0,9 mm, Standard IA, Silicone IA, INTREPID IA	2,75 mm
Ultra-manchon de 0,9 mm	Rouge	Embouts de 0,9 mm et ABS MicroTip , Embouts 0,9mm ABS Mini et MiniFlared ABS Tip, Silicone IA, INTREPID IA	2,2 mm
Nano-manchon de 0,9 mm	Orange	Embouts de 0,9 mm et ABS MicroTip , Embouts 0,9mm ABS Mini et MiniFlared ABS Tip, Silicone IA, INTREPID IA	1,8 mm

8. si la chambre test de la pièce à main U/s est assésée après la mise en phase, le débit d'irrigation à travers la pièce à main peut être faible et entraîner un déséquilibre des fluides. ceci peut, à son tour, causer un manque de profondeur ou un affaissement de la chambre antérieure.
9. Les Bonnes pratiques cliniques imposent de tester le débit d'irrigation, d'aspiration, le reflux et le fonctionnement sont corrects pour chaque pièce à main avant d'entrer dans l'œil.
10. ne pas dépasser la capacité maximale (500 ml) de la poche de recueil. Dépasser ce volume est susceptible de mettre le patient en danger.
11. tous les liquides aspirés pendant l'opération doivent être traités comme potentiellement contaminants. prendre les précautions appropriées lors de la manipulation des appareils et des lignes en contact avec les fluides aspirés.
12. L'appareil utilisé en association avec le pack de composants à usage unique Alcon constitue un système chirurgical complet. L'utilisation de composants à usage unique autres que ceux d'Alcon peut affecter les performances du système et être potentiellement dangereuse et s'il s'avère que ceci a contribué au dysfonctionnement d'un appareil sous contrat, il pourra en résulter l'annulation de ce dernier et/ou une facturation au taux horaire en vigueur.
13. Les packs **Constellation** ne sont destinés qu'à une seule intervention. La réutilisation, un usage incorrect ou un mauvais assemblage peuvent être dangereux pour le patient. Alcon décline toute responsabilité en cas de complications qui peuvent résulter de la réutilisation ou d'un usage incorrect de tout ou partie du pack.
 - Les risques potentiels d'une réutilisation ou d'un retraitement incluent : une phototoxicité liée à l'exposition à une illumination irrégulière en raison d'une fibre ou d'un connecteur endommagé, une puissance de laser/illumination réduite, des fuites ou une obstruction des voies des fluides résultant en des performances, fluïdiques réduites, une performance de coupe du vitre réduite, une diminution de la performance de coupe de l'embout, la présence de bavures sur l'embout et l'introduction de corps étrangers dans l'œil.
14. La canule d'insufflation fournie dans ce pack n'est pas destinée à une utilisation sous haute pression en particulier pour l'injection d'huile de silicone.
15. La sonde UltraVitr[®] HyperVitr[®] est testée pour 20 minutes d'utilisation à la vitesse maximale de coupe.

Définitions des symboles pouvant apparaître sur les étiquettes du produit :

		SE REFERER AU MODE D'EMPLOI				OUVERTURE				LOT N°				FABRICANT	
		UTILISER AVANT :				USAGE UNIQUE - NE PAS REUTILISER				CODE ARTICLE				DATE DE FABRICATION	
		NE CONTIENT NI LATEX NI CAOUTCHOUC NATUREL SEC						STERILE - STÉRILISÉ L'OXYDE D'ETHYLENE						CONTIENT DE DEHP	
		NE PAS UTILISER SI L'EMBALLAGE EST ENDOMMAGÉ						MANDATAIRE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE							
		ATTENTION : AUX ETATS-UNIS, LA LOI RESTREINT LA VENTE DE CE DISPOSITIF, SOIT DIRECTEMENT PAR LES MEDECINS, SOIT SUR LEUR PRESCRIPTION.													

EC REP

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, Royaume-Uni

** Mactool est une marque déposée de Richard J. Mactool, MD.
© 2008, 2015 Novartis



*une marque déposée Novartis

Alcon A Novartis Division

Alcon Laboratories, Inc
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099 USA
Alcon est une marque déposée de Novartis

812-2675-001REV.J